



INSTRUKTIONER FÖR eSwab - VÄTSKEBASERAD PROVTAGNING

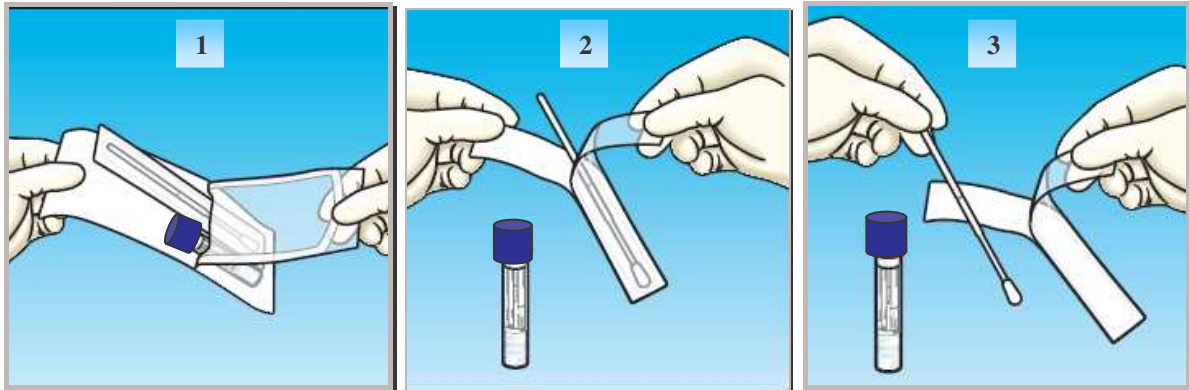


- Öppna förpackningen enligt bild 1-3 ovan. Spara höljet!
- Endast flockad pinne som följer med setet får användas.
- Ta provet enligt anvisningar på Analysportalen för respektive provlokal.
- Följ därefter instruktionen enligt bild 4-6 nedan. OBS! Instruktionen på provförpackningen gäller ej.



Skruva av korken på röret. Sätt ner pinnen i röret så att det når botten och rotera provtagningspinnen ca 5 sekunder i transportmediet. Lyft upp pinnen samtidigt som du trycker den mot rörets vägg för att pressa ut så mycket som möjligt av vätskan.

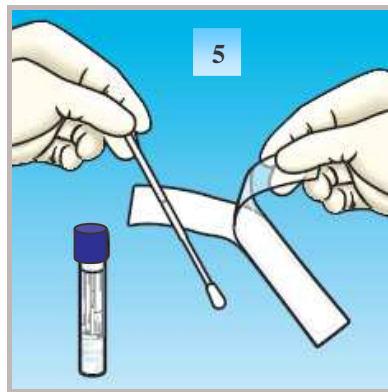

Stoppa därefter tillbaka pinnen i höljet. Kastas som konventionellt avfall.

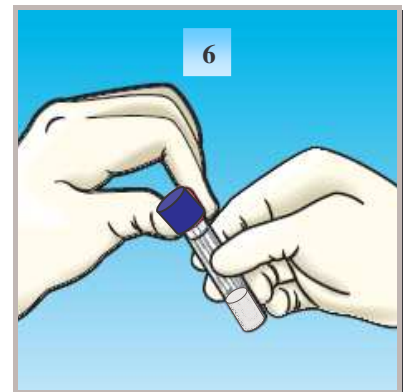

Skruva på korken ordentligt. Märk provet och skicka in det till laboratoriet så snart som möjligt.