


Provtransportbox till CSK/Hässleholm

Sampackning till Kemiska laboratoriet/Bakteriologiska laboratoriet

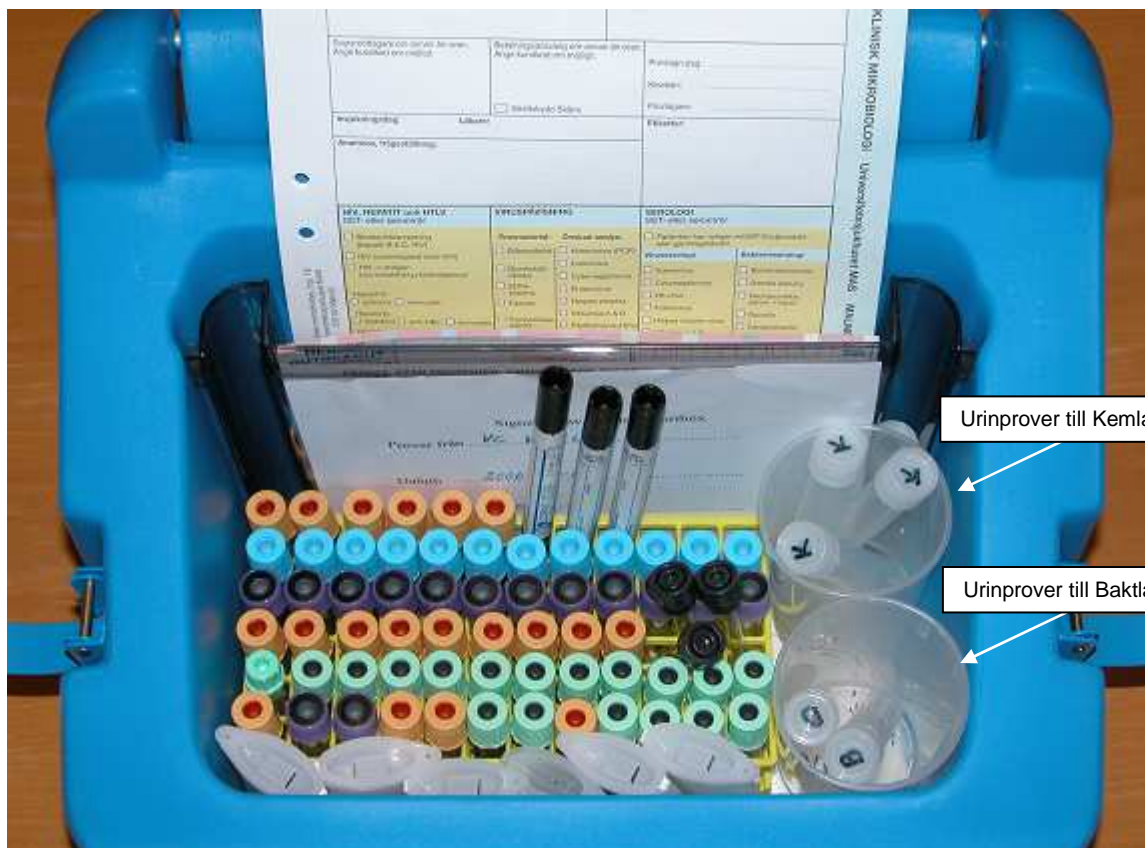

Packning av provtransportbox till Kemiska laboratoriet Kristianstad/Hässleholm

Rutin för sampackning av prover till Kemiska laboratoriet och Bakteriologiska laboratoriet, Kristianstad/Hässleholm

Innan boxen packas kontrollera att remiss och rör stämmer överens.

- Prover till kem lab placeras **främst i stället**. Börja med prover med specialremiss och prover till annat kem lab. Fyll därefter på med rör sorterade efter färg avsluta med citrör (PK-rör). Detta för att få en gräns mellan kem labs och bakt labs prover. När två ställ packas måste PK-rören placeras i det understa stället.
- Prover till bakt lab placeras **sist i stället**. Här ställs även prover till mikrobiologen och immunologi i Lund och Malmö. **Skriv önskad analys på namnetiketten.**
- Blodsmittaprover placeras i stället utan transporthylsa.
- Urinproverna till respektive laboratorium separeras om möjligt i varsin mugg. Märk korken med **K** (kemi) eller **B** (bakt).
- Remisserna placeras i remissfacket. Placera specialremisser typ proteiner och remisser till andra kem lab främst, därefter Rutin/Akut-remissen sätt ett gem om PK-remisserna. Sist placeras baktremisserna. Vik ej remisserna. Fyll i och placera ”signeringsblanketten” framför remisserna.
- En kylklamp placeras på avsedd plats i locket vid packning.
- Röd tejprensa på lockets utsida betyder att boxen är tom. När proverna är packade **måste** tejpens tas bort. Transport får **inte** ta några boxar från er märkt med röd tejp.

Tom box från kem lab

- Transport skall lämna lika många tomma boxar hos er som han/hon tar.
- Placera kylklampen i frysen.

Rengöring

- Första måndagen i månaden rengörs de boxar som finns hos er.
- Boxen sprittorkas och absorbenten byts vid behov.
- Absorbenten beställs på MA-Skåne Art-nr 17787

Vid frågor ring:

Eva-Britt Nilsson Kemiska laboratoriet Kristianstad tel 044-309 19 37 eller 044-309 19 30

Irène Ström Kemiska laboratoriet Hässleholm tel 0451-29-63 39

Eva Rydsberg Bakteriologiska laboratoriet Kristianstad tel 044-309 19 00