


Transport av prover i rörpost och point-to-point

Innehåll

1 Rörpostpatron utan insats	3
2 Rörpostpatron med insats i Lund	5
3 Rörpostpatron med insats i Malmö och Helsingborg.....	6
4 Point-to-point	7
5 Blodkomponenter i rörpost	8

1 Rörpostpatron utan insats

1. Packa prover och remisser i avsedd plastpåse.
Art.6039062
2. Rulla ihop påsen och fäst ett gummiband mitt på plastpåsen.
3. Placera plastpåsen i rörpostpatronen.
4. Packa endast **en** påse med prov-behållare per patron och/eller max 2 blododlingsflaskor. Överfulla rörpostpatroner orsakar **driftstopp!**
5. Stäng båda locken före transport.

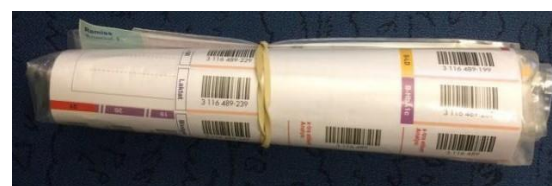

Patronerna ser olika ut på respektive ort men packning sker på samma sätt.



Öppna patronen genom att vrida locket moturs



Öppen



Placera plastpåsen i patronen



Vrid medurs för att stänga



Patronen är stängd

Packa prov i plastpåse med fyra fack:					
- Vid ett fåtal rör läggs dessa i fickan i mitten. - Max två blododlingsflaskor i varje påse. - Om provbehållaren inte får plats i en liten ficka läggs provet i den stora fickan för remisser. - Om provet packas i grön transportburk, läggs remiss i plastpåse inne i burken. - Plastpåsar beställs via Marknadsplatsen art.6039062					
Använd transporthylsa, enligt anvisning i Analysportalen:					
- Sputumburk - Urinprover som inte är tagna i vakuumrör - Faeces på burk - Endast till provflaska TB 200mL - Objektglas	1 	2 	3 	4 	5 
Tänk på att					
- Alla prov i påsen ska åtföljas av remiss som läggs i det stora facket - Vik inte remissen - Vik ner "locket" på plastpåsen ordentligt - Rulla ihop påsen från kortsidan och omslut med gummiband					
Skicka INTE följande prov med rörpost					
- Likvor - Blodgaser i spruta	- Aspirin effekt - P2Y12-hämning	- Prov på is eller i vattenbad - Vävnadsprov i formalin			

2 Rörpostpatron med insats i Lund



- Beställningen ska vara digital, i eLAB RS. Observera att provtagningen måste vara **bekräftad** i eLAB RS innan provet packas i patronen.
- Endast för provrör med **rund** botten.
- Dessa rör får **inte** skickas i rörpostpatron med insats:
 - Rör med flat botten
 - Quantiferonrör

NEJ!



- Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
- Kapillära prov och blodgas-sprutor
- Rör över 16 mm i diameter
- Korken på rören får aldrig ha varit avtagen.
- Etiketten ska sitta lodrätt och rakt.
- Adressera till Laboratoriemedicin Bas, Station 1.
- Patron med insats beställs via Weblord, ange enhet och rörpoststationsnummer vid beställning.

3 Rörpostpatron med insats i Malmö och Helsingborg



- Beställningen ska vara digital, i eLAB RS. Observera att provtagningen måste vara **bekräftad** i eLAB RS innan provet packas i patronen.
- Endast för provrör med **rund** botten.
- Dessa rör får **inte** skickas i rörpostpatron med insats:
 - Rör med flat botten
 - QuantiFERONrör



- Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
- Kapillära prov och blodgas-sprutor
- Rör över 16 mm i diameter
- Korken på rören får aldrig ha varit avtagen.
- Etiketten ska sitta lodrätt och rakt.
- Det stora hålet är enbart till för blododlingsflaskor.
- Adressera till 114030 provmottagning Laboratoriemedicin Bas (snabbval *1).
- Patron med insats beställs via Weblord, ange enhet och rörpoststationsnummer vid beställning.

4 Point-to-point

- Beställningen ska vara digital, i eLAB RS. Observera att provtagningen måste vara **bekräftad** i eLAB RS innan provet matas in i sändenheten.
- Endast för provrör med **rund** botten.
- Dessa rör får **inte** skickas i point-to-point (P2P):
 - Rör med flat botten
 - Quantiferonrör



- Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
- Kapillära prov och blodgas-sprutor
- Rör över 16 mm i diameter
- Korken på rören får aldrig ha varit avtagen.
- Etiketten ska sitta lodrätt, rakt och i samma höjd som på bilden.
- Provrör skickas med botten först. Avvakta grönt ljus.



5 Blodkomponenter i rörpost

Vid transport av blodkomponenter används **blå** patroner. Dessa är reserverade för Transfusionsmedicin och skall skickas tillbaka så snart som möjligt då antalet är begränsat. Inga prover eller dylikt får heller skickas i dessa patroner då blodkomponenter skall försvara i en ren miljö.

Transfusionsmedicin kan skicka de vanligaste blodkomponenterna i rörpost

- Erytrocyter
- Plasma
- Trombocyter

Blodkomponenter från avdelningar till Transfusionsmedicin

- Kontakta Transfusionsmedicin och be om att få en **blå patron** skickad till er för returnering av blodkomponenter.
De blå patronerna är reserverade för Transfusionsmedicin och antalet är begränsade. Därför skall de alltid tillbaka till Transfusionsmedicin så snart som möjligt och får inte "sparas" för framtida bruk.
- Lägg blodkomponenten i en **ren** plastpåse, t.ex. fryspåse, som försluts ordentligt, t.ex. med gummiband.
*Använd **INTE** provrörspåsar – dessa kan vara kontaminerade med smitta från provrör.*
- Skriv RETUR, datum, tid för retur och signatur på blodkomponentens följesedel och skicka tillbaka den **blå patronen** med blodkomponent till Transfusionsmedicin.
Detta är för att säkerställa spårbarhet för hur länge komponenten befunnit sig i rörpostsystemet.

- Blodkomponenter som förvaras vid samma temperatur kan skickas tillsammans.

Erytrocyter och plasma kan transporteras i samma patron.

Trombocyter transporteras för sig eftersom de ska skyddas från kyla.



*Korrekt packad blodkomponent i en **ren** plastpåse (i detta fall en fryspåse) och ordentligt försluten.*



Blodkomponent packad i påse avsedd att skicka provrör i.

- Max 4 st. blodkomponenter får returneras med rörposten.
Då fler än 4 st. blodkomponenter ska returneras vid samma tillfälle bör manuell transport till Transfusionsmedicin ske.
- Blodkomponenter kan returneras dygnet runt, men p.g.a. bemanning på Transfusionsmedicin bör det helst ske vardagar mellan kl. 8 – 16.

Blodkomponenter som INTE skickas med rörpost

- Special komponenter, exempelvis utbytesblod
- Stora mängder plasma, t.ex. Octaplas vid plasmabyte
- Blodkomponent med kopplat transfusionsaggregat eller som har gått sönder.

Vid osäkerhet; ring Transfusionsmedicin på respektive ort och fråga innan ni skickar blodkomponenten.