



Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13

Kontrollblad interna kontroller CRP (Afinion)

DokumentID 88335581

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller CRP (Afinion)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



Kontrollblad interna kontroller CRP (Afinion)

Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (testkassett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mg/L)	Börvärde (mg/L)	Resultat (mg/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)


Datum	Lotnummer reagens (testkassett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mg/L)	Börvärde (mg/L)	Resultat (mg/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Instruktion för kontrollblad interna kontroller CRP (Afinion)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning

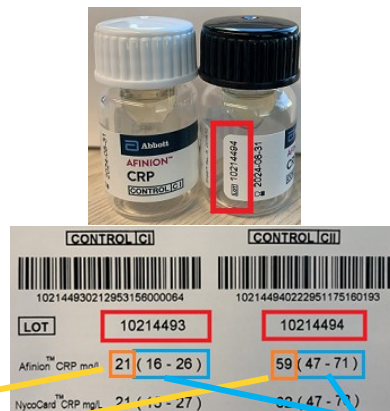

Lotnummer testkasset



Börvärde nivå 1

Börvärde nivå 2

Gräns för godkänd intern kontroll

Reagens (testkasset): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i 2–8° C (kyl) och hållbart en månad vid förvaring i rumstemperatur.

Så här fyller du i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: 10214494

Intern kontrollösning öppnad: 250807 Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (testkasset)	Gränser för godkänd intern kontroll (mg/L)	Börvärde (mg/L)	Resultat (mg/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
250814	10219865	47 - 71	59	46	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	10219865	47 - 71	59	59	Ja		XX