

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13



Kontrollblad interna kontroller Glukos (AccuChek Inform II)

DokumentID 88347034

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller Glukos (AccuChek)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

Kontrollblad interna kontroller Glukos (AccuChek Inform II)

Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur



Datum	Lotnummer reagens (testremsa)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur


Datum	Lotnummer reagens (testremsa)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Instruktion för kontrollblad interna kontroller Glukos (AccuChek Inform II)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning

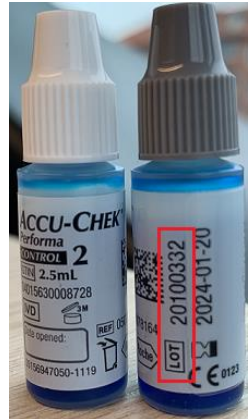

Lotnummer testremsa



Gräns för godkänd intern kontroll

Reagens (testremsa): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

Så här fyller du i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: 20100332

Intern kontrollösning öppnad: 250807

Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum

Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (testremsa)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
251020	671052	14,5 – 19,6	13.1	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
251020	671052	14,5 – 19,6	17,8	Ja		XX