



Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-04-10

Kontrollblad interna kontroller U-Testrensa och U-hCG (Clinitek Status+)

DokumentID 88352837

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller urinalys och hCG (Clinitek)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



Kontrollblad interna kontroller U-Testremsa och U-hCG (Clinitek Status+)

Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Lotnummer testremsa: _____ Lotnummer hCG kassett: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Gränser för godkänd kontroll								Godkänd (Ja/Nej)	Orsak och åtgärd	Sign
	Glu (Neg)	Ket (Neg)	Blod (Neg - ± intakt)	pH (5,0 - 6,0)	Pro (Neg)	Nit (Neg)	Leu (Neg)	hCG (Neg)			

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Lotnummer testremsa: _____ Lotnummer hCG kassett: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)


Datum	Gränser för godkänd kontroll								Godkänd (Ja/Nej)	Orsak och åtgärd	Sign
	Glu (2 - 3)	Ket (3 - 5)	Blod (2 - 3)	pH (7,0 - 8,5)	Pro (3)	Nit (Pos)	Leu (4)	hCG (Pos)			

Instruktion för kontrollblad interna kontroller U-Testremsa och U-hCG (Clinitek Status+)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning

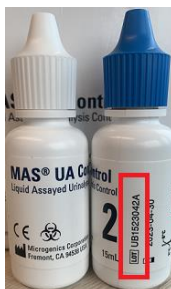

Lotnummer testremsa



Lotnummer hCG kassett



Reagens (urintestremsa/testkassett): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

Så här fyller du i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: UB1523042A

Lotnummer testremsa: 112040 Lotnummer hCG kassett: 085533

Intern kontrollösning öppnad: 250807 Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: 2-8° C (kyl)

Datum	Gränser för godkänd kontroll								Godkänd (Ja/Nej)	Orsak och åtgärd	Sign
	Glu (2 - 3)	Ket (3 - 5)	Blod (2 - 3)	pH (7,0 - 8,5)	Pro (3)	Nit (Pos)	Leu (4)	hCG (Pos)			
250814	1	2	3	8,0	3	Pos	4	Pos	Nej	Handhavandefel. Analyseras om	XX
250814	3	4	3	8,0	3	Pos	4	Pos	Ja		XX

DokumentID 88352837

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller urinalys och hCG (Clinitek)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.