



Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13

Kontrollblad interna kontroller k-PT (INR) (CoaguChek Pro II)

DokumentID 88356073

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller k-PT (INR) (CoaguChek)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



Kontrollblad interna kontroller k-PT (INR) (CoaguChek Pro II)

Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning hållbarhet: 30 minuter efter tillblandning

Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (INR)	Börvärde (INR)	Resultat (INR)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____


Intern kontrollösning hållbarhet: 30 minuter efter tillblandning

Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (INR)	Börvärde (INR)	Resultat (INR)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Instruktion för kontrollblad interna kontroller k-PT (INR) (CoaguChek Pro II)


Serienummer på instrument

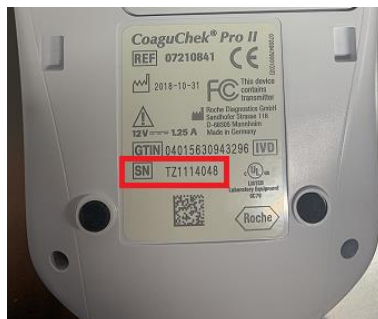

Lotnummer kontrollösning



Lotnummer teststickor

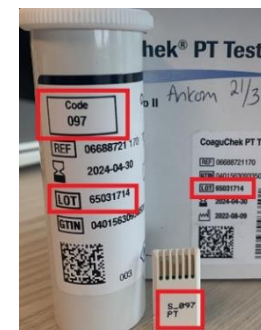

Reagens (teststicka): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

Så här fyller du i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: 70190300

Intern kontrollösning hållbarhet: 30 minuter efter tillblandning

Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (INR)	Börvärde (INR)	Resultat (INR)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
250814	65031714	1,0 – 1,4	1,2	1,6	Nej	Handhavandefel. Analyserar om.	XX
250814	65031714	1,0 – 1,4	1,2	1,3	Ja		XX