



# Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13

## Kontrollblad interna kontroller CRP (QuikRead go och QuikRead go Plus)

DokumentID 88377897

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller CRP (QuikRead go)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



## Kontrollblad interna kontroller CRP (QuikRead go och QuikRead go Plus)

Vårdenhet: \_\_\_\_\_ Serienummer på instrument: \_\_\_\_\_ Egennamn/placering: \_\_\_\_\_

**Kontrollnivå 1** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 2 månader efter öppningsdatum Förvaring: 2-8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mg/L)	Börvärde (mg/L)	Resultat (mg/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur


**Kontrollnivå 2** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 2 månader efter öppningsdatum Förvaring: 2-8° C (kyl)


Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mg/L)	Börvärde (mg/L)	Resultat (mg/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

## Instruktion för kontrollblad interna kontroller CRP (QuikRead go och QuikRead go Plus)

## Serienummer på instrument

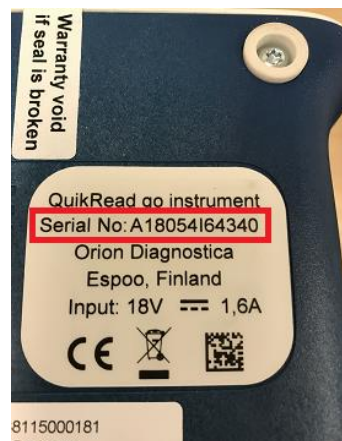

## Lotnummer kontrollösning

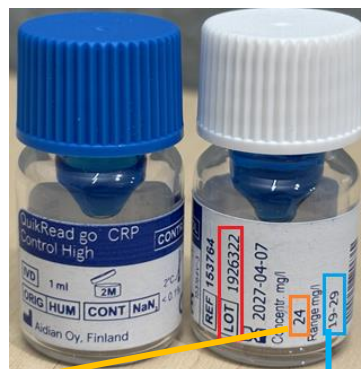

Börvärde

Gräns för godkänd intern kontroll

## Lotnummer reagens



**Reagens:** Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

## Så här fyller du i ditt kontrollblad:

**Kontrollnivå 1** Lotnummer på intern kontrollösning: 1926322

Intern kontrollösning öppnad: 250807

Hållbarhet: 2 månader efter öppningsdatum

Förvaring: 2-8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens	Gränser för godkänd intern kontroll (mg/L)	Börvärde (mg/L)	Resultat (mg/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
250814	KV56	19 - 29	24	17	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	KV56	19 - 29	24	23	Ja		XX