



# Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-05-18

## Kontrollblad interna kontroller Glukos (HemoCue 201 DM RT)

DokumentID 88404525

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller Glukos DM RT (HemoCue)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



## Kontrollblad interna kontroller Glukos (HemoCue 201 DM RT)

Vårdenhet: \_\_\_\_\_ Serienummer på instrument: \_\_\_\_\_ Egennamn/placering: \_\_\_\_\_

**Kontrollnivå 2** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

**Kontrollnivå 3** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

## Instruktion för kontrollblad interna kontroller Glukos (HemoCue 201 DM RT)

### Serienummer på instrument



### Lotnummer kontrollösning



### Lotnummer kuvett



### Gräns för godkänd intern kontroll

**Reagens (kuvett):** Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

**Så här fyller du i ditt kontrollblad:**

**Kontrollnivå 3** Lotnummer på intern kontrollösning: 51862

Intern kontrollösning öppnad: 251015 Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
251023	230196B	10,7 ± 1,2	10,7	9,4	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
251023	230196B	10,7 ± 1,2	10,7	10,7	Ja		XX