



# Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13

## Kontrollblad interna kontroller HbA1c (Afinion)

DokumentID 88404778

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller HbA1c (Afinion)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



## Kontrollblad interna kontroller HbA1c (Afinion)

Vårdenhet: \_\_\_\_\_ Serienummer på instrument: \_\_\_\_\_ Egennamn/placering: \_\_\_\_\_

**Kontrollnivå 1** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 2 månader efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (testkassett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/mol)	Börvärde (mmol/mol)	Resultat (mmol/mol)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

**Kontrollnivå 2** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 2 månader efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)


Datum	Lotnummer reagens (testkassett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/mol)	Börvärde (mmol/mol)	Resultat (mmol/mol)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

## Instruktion för kontrollblad interna kontroller HbA1c (Afinion)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning

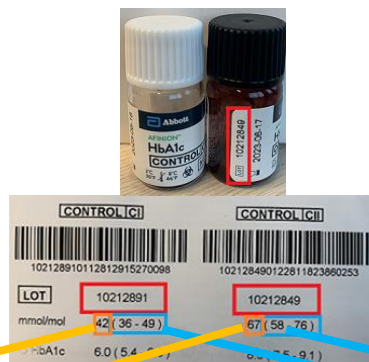

Lotnummer testkassett



Börvärde nivå 1

Börvärde nivå 2

Gräns för godkänd intern

**Reagens (testkassett):** Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i 2–8° C (kyl) och hållbart tre månader vid förvaring i rumstemperatur.

### Så här fyller du i ditt kontrollblad:

**Kontrollnivå 2** Lotnummer på intern kontrollösning: 10212849

Intern kontrollösning öppnad: 250807

Hållbarhet: 2 månader efter öppningsdatum

Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (testkassett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/mol)	Börvärde (mmol/mol)	Resultat (mmol/mol)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
250814	10213057	58 - 76	67	52	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	10213057	58 - 76	67	66	Ja		XX