



# Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13

## Kontrollblad interna kontroller Leukocyter och diff (HemoCue WBC DIFF)

DokumentID 88405426

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller WBC-diff (HemoCue)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

## Kontrollblad interna kontroller Leukocyter och diff (HemoCue WBC DIFF)

Vårdenhet: \_\_\_\_\_ Serienummer på instrument: \_\_\_\_\_ Egennamn/placering: \_\_\_\_\_



**Kontrollnivå 3** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2-8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och Åtgärd	Signatur

**Kontrollnivå 2** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2-8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och Åtgärd	Signatur

**Kontrollnivå 1** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2-8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och Åtgärd	Signatur

## Instruktion för kontrollblad interna kontroller Leukocyter och diff (HemoCue WBC DIFF)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning



Lotnummer kuvett



**Reagens (kuvett):** Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

**Intern kontrollösning:** Börvärden och gränser för godkänd kontroll finns angivna på bipacksedeln som följer med kartongen med kontrollösningen.

### Så här fyller du i ditt kontrollblad:

**Kontrollnivå 1** Lotnummer på intern kontrollösning: HD08252

Intern kontrollösning öppnad: 250807 Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och Åtgärd	Signatur
250814	2501139	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	2501139	Ja		XX