



Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13

Kontrollblad interna kontroller Hb 201 DM (HemoCue)

DokumentID 88408750

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller Hb DM (HemoCue)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



Kontrollblad interna kontroller Hb 201 DM (HemoCue)

Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (g/L)	Börvärde (g/L)	Resultat (g/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)


Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (g/L)	Börvärde (g/L)	Resultat (g/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Instruktion för kontrollblad interna kontroller Hb 201 DM (HemoCue)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning

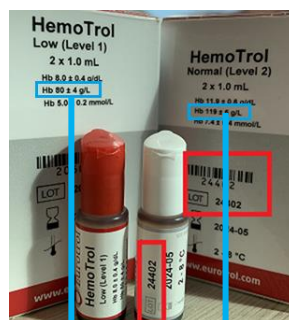

Gräns för godkänd intern kontroll

Lotnummer kuvett



Reagens (kuvett): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

Exempel på hur du fyller i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: 24402

Intern kontrollösning öppnad: 250807 Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lot-nummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (g/L)	Börvärde (g/L)	Resultat (g/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
250814	2203752	119 ± 6	119	101	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	2203752	119 ± 6	119	121	Ja		XX