



Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-03-05

Kontrollblad interna kontroller Glukos (cobas pulse)

DokumentID 91680231

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller Glukos (cobas pulse).docx

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



Kontrollblad interna kontroller Glukos (cobas pulse)

Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (testremsa)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur


Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (testremsa)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Instruktion för kontrollblad interna kontroller Glukos (cobas pulse)


Serienummer på instrument

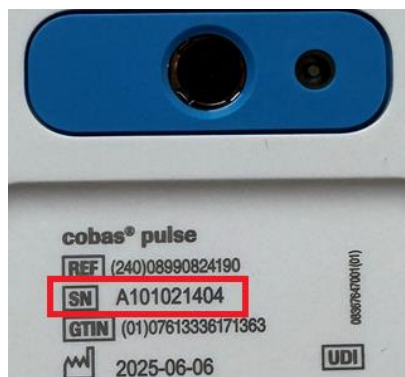

Lotnummer kontrollösning



Lotnummer testremsa

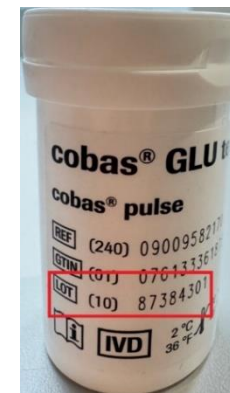

Reagens (testremsa): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

Så här fyller du i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: 25800507

Intern kontrollösning öppnad: 251016

Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum

Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (testremsa)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
251023	87384301	15,6 – 19,8	13.1	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
251023	87384301	15,6 – 19,8	17,8	Ja		XX