

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-09-11



Provtagningsinstruktion

Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium

Provtagningsmateriel: Aptima Hologic provtagningsset



Provtyp	Etikettfärg provset	Art. nr
Urin	Gul	24244
Vagina, rektum, svalg, ögonsekret eller övrigt sekret	Orange	24245
Cervix och uretra	Vit	24243

- Urine Specimen Collection Kit används till urinprov - **GUL etikett**
- Multitest Swab Specimen Collection Kit används till vaginal-, rektum-, svalg- ögon- och övriga sekret - **ORANGE etikett**
- Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab Specimens används till uretra- och cervixsekret – **VIT etikett**

Vätskan i röret gör att provet håller sig längre. Vid spill på huden sköljs rikligt med vatten.

Om prov för *Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae* och *Mycoplasma genitalium* tas vid samma provtagningstillfälle krävs 2 olika beställningar och prov.

Vaginalprov

För kvinnor rekommenderas vaginalprov. Endast urinprov på kvinnor har lägre känslighet än vaginalprov.


- Använd provtagningsset med ORANGE etikett.
- För in provtagningspinnen ca 3- 4 cm i vagina.
- Roterar pinnen två varv utmed vaginalväggen. Ta ut pinnen.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Urinprov

Vid misstanke på urogenital infektion hos män, rekommenderas förstaportionsurin.

- Använd provtagningsset med GUL etikett.
- Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen.
- Samla upp första portionsurinen i lämpligt kärl eller mugg – c:a ¼ dL.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Överför med pipett som medföljer setet, ca 2 mL av urinprovet till transportröret.
- Kontrollera att vätskenivån efter tillsats av urin hamnar mellan pilarna på röret. Se bild.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.

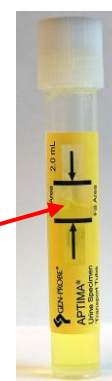

Svalgsekret

- Använd provtagningsset med ORANGE etikett.
- Roterar provtagningspinnen mot tonsillerna och bakre svalgväggen. Se till att pressa pinnen mot tonsillerna och deras kryptor.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Rektumsekret

Provtagning sker med fördel via proktoskop.

- Använd provtagningsset med ORANGE etikett.
- För in provtagningspinnen ca 3-4 cm i rektum och rotera mot slemhinnan.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Uretraprov

- Använd provtagningsset med VIT etikett.
- Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen.
- För upp provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) ca 2 cm i uretra.
- Roterar pinnen 2-3 sekunder.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Cervixprov

- Använd provtagningsset med VIT etikett.
- Rengör portio med tvättpinnen (vitt skaft i förpackning med röd text).
- Släng tvättpinnen.
- För in provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) i cervixkanalen.
- Roterar pinnen.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Konjunktivalsekret/ögonsekret

- Använd provtagningsset med ORANGE etikett.
- Avlägsna försiktigt pus och sekret i ögat med en bomullspinne alt en kompress fuktad med koksalt.
- Stryk provtagningspinnen över insidan av det nedre ögonlocket.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.

